

VaiTeg-Pro - Conector Libre de Agujas

Descripción

Conector libre de agujas, creado especialmente para el uso en catéteres de hemodiálisis, su alto flujo, asegura un procedimiento sin restricciones ni hemolisis.

Uso

- Se utiliza para la conexión a circuitos de hemodiálisis crónica y aguda, permanece conectado a las líneas de hemodiálisis antes, durante y después del procedimiento y hasta por 7 días, manteniendo el sistema cerrado sin necesidad de utilizar tapas u otro tipo de sello. Su superficie plana y lisa facilita su desinfección. La carcasa transparente proporciona una buena observación. La válvula dividida con apertura automática permite conexiones integrales.
- El producto se utiliza para cerrar puerto de transfusión sanguínea.
- Administrar medicamentos líquidos cuando el adaptador está cerrado y evitar la contaminación del sistema de transfusión durante la terapia de infusión intravenosa.
- Se utiliza para acceder a sistemas intravenosos de forma segura en pacientes que requieren administración de fluidos, medicamentos o toma de muestras sanguíneas.
- Se utiliza para la conexión a circuitos de hemodiálisis crónica y aguda.

Características

- Capacidad de flujo se adapta a caudales superiores a 600ml/min.
- Desplazamiento neutro
- Espacio muerto de 0,06 ml
- Libre de Latex y DEHP
- Sin componentes metálicos
- Compatible con conectores Luer-Lock y Luer Slip

- Compatible con sangre, lípidos, alcohol y clorhexidina

Contraindicaciones

- Pacientes con hipersensibilidad conocida a los materiales del conector.
- Contraindicado si el dispositivo presenta daños visibles o si la integridad de su empaque estéril está comprometida.

Composición

El dispositivo está fabricado con policarbonato de grado médico y elastómeros libres de látex. Incorpora una válvula autosellante de silicona que asegura biocompatibilidad y prevención de reflujo.

Clasificación

- Unión Europea (UE): Clase II A, según el Reglamento (UE) 2017/745 (MDR).
- CE
- ISO 13485
- CFDA
- FSC

América Latina:

- México: Clase II bajo la NOM-241-SSA1.
- Brasil: Clase II según ANVISA.

El conector tiene un diseño compacto y ligero con una interfaz Luer lock (puerto de conexión para cierre de catéteres en hemodiálisis y otros catéteres venosos centrales) estándar, un volumen priming promedio de 0.02 ml y capacidad de soportar presiones de hasta 300 psi, compatible con sistemas de infusión estándar y bombas de alta presión.

Descripción del Empaque

Envasado en blíster estéril que asegura la integridad del dispositivo hasta su uso.

Empaque Primario	Empaque Secundario
Blíster Individual	Caja con 100 Uds.

Esterilización

Esterilizado mediante radiación gamma o óxido de etileno (ETO), asegurando cumplimiento con normas internacionales de esterilidad.

Vigencia (vida útil)

Vida útil de 3 años en empaque cerrado, dependiendo de las condiciones de almacenamiento y la fecha de fabricación.

Almacenamiento

Debe mantenerse en un lugar seco, a temperatura controlada de 10 °C a 30 °C, protegido de la luz solar directa y fuentes de humedad o calor extremo.

Producto

